



軟性コルセットの装着方法

① パーツの確認

上部のパット

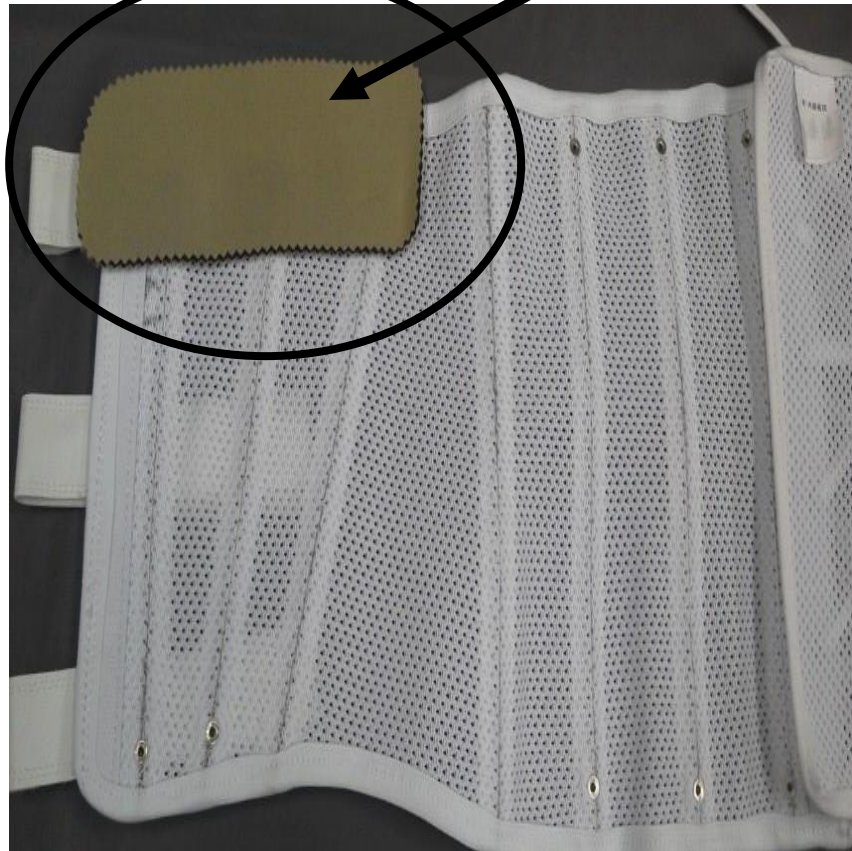


後方のヒモ

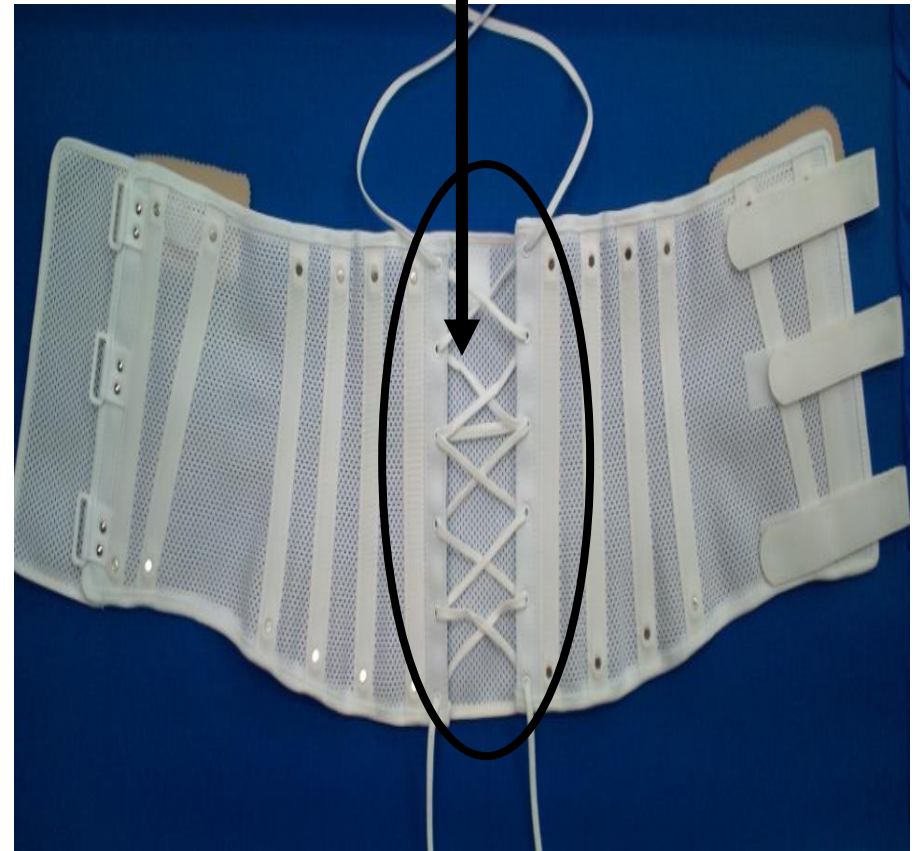

上部にパット2つ、後方にヒモが付いているか確認します。

②装着位置


ネームタグ(後方か前方にある)

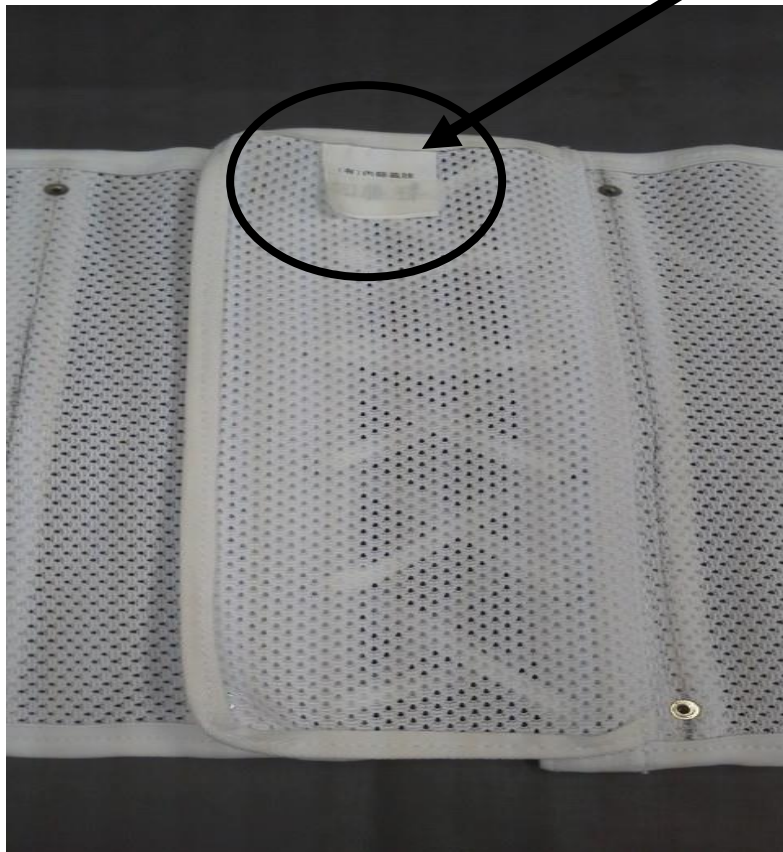

ネームタグが付いている方を背中側にあて、ウエスト周りに合わせて覆います。パッドが着いている時はタグがお腹側にきます。

この際、×印(骨盤の骨)を少し覆うようにします。


③マジックの付け方

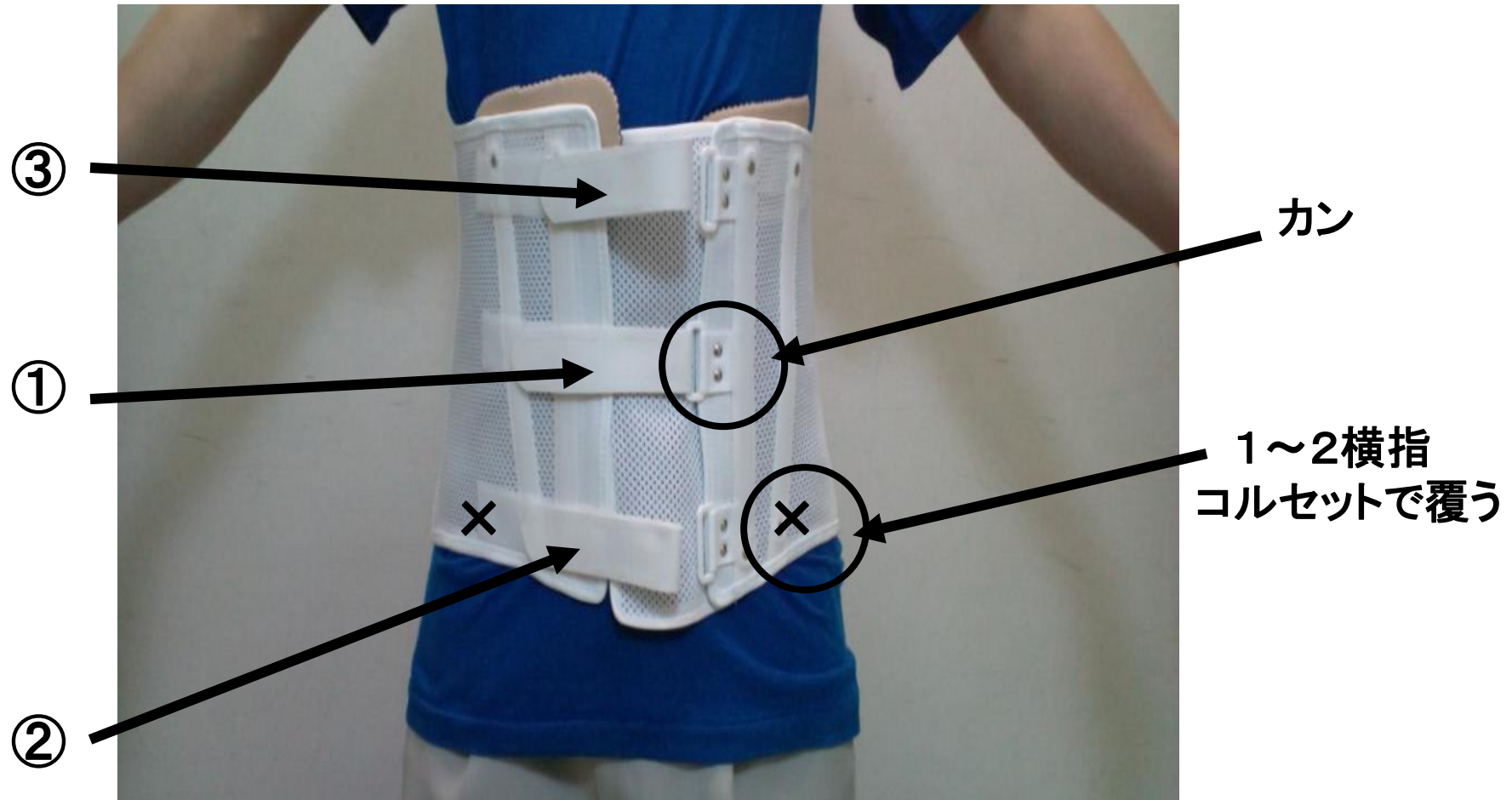

※マジックの本数はコルセットの長さに応じて多くなります。

大体の位置が決まったら、1から順番にマジックをカンに通して折り返します。締め加減には注意！
×印(骨盤の骨)がコルセットで覆われてるかチェック

④後方のヒモ

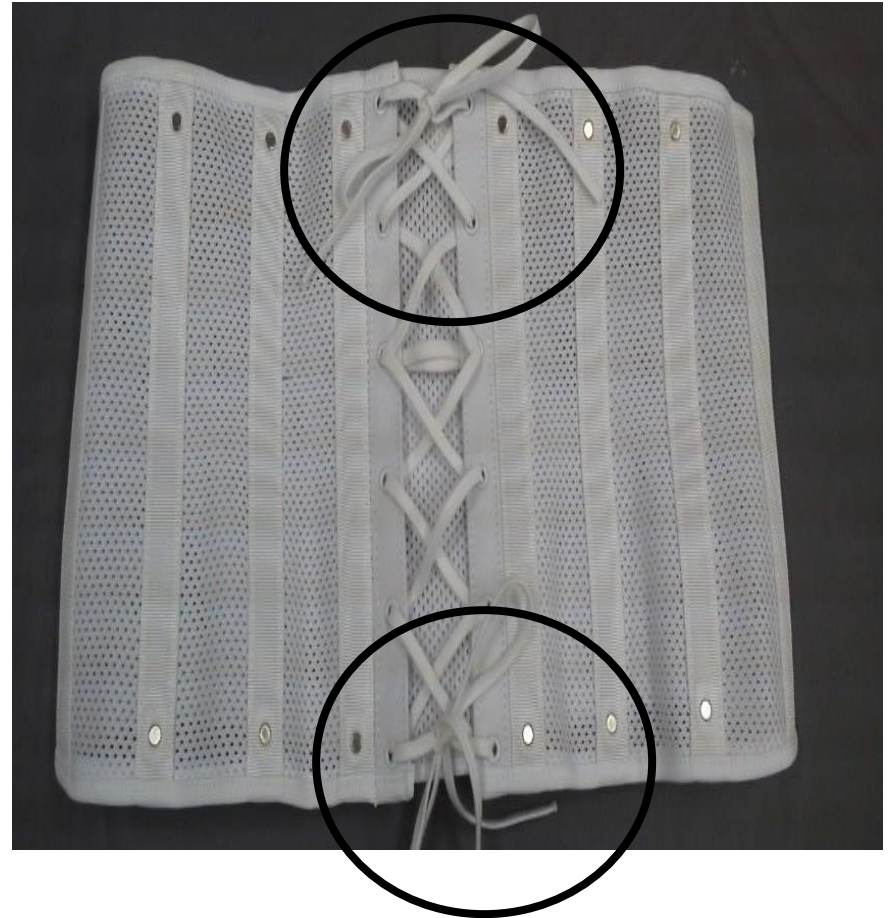


後方のヒモは、装着時に医師・義肢装具士が調整をします。

基本的には装着者自身で調整する必要はありません。

外れてしまった場合は蝶々結びをして下さい。

⑤装着位置の確認

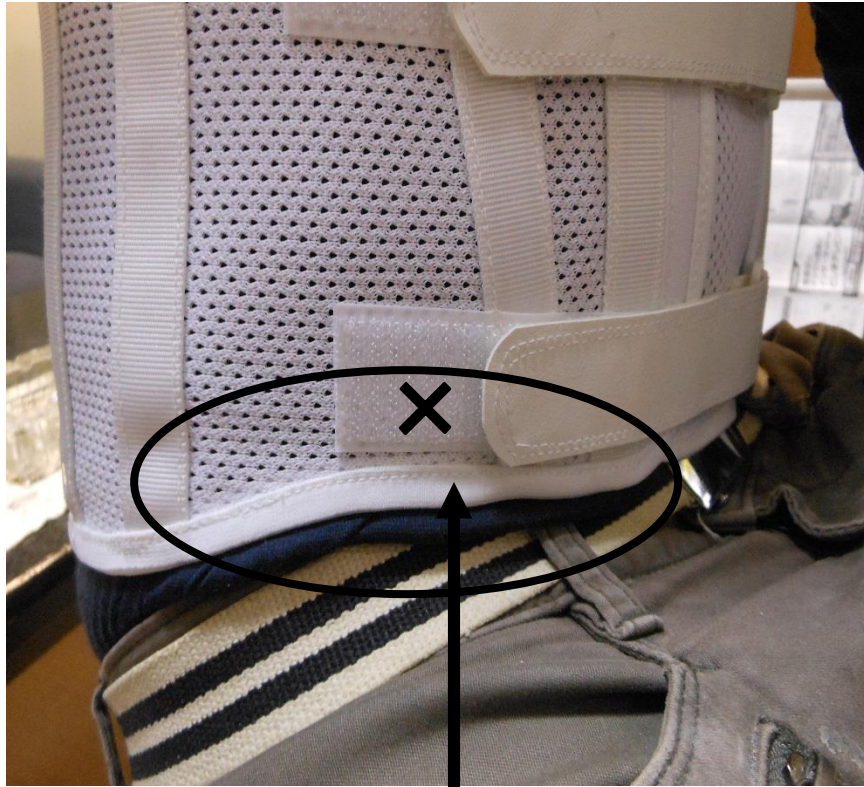

装着方法によってぶつかる部分



×印は1～2横指コルセットで覆う

装着したらベッドやイスに座り、足の付け根にコルセット下縁が当たらないか確認して下さい。当たる場合は少しコルセットを上をずらして下さい。
※低いイスや足を上げようとするとぶつかってきます。

⑥注意事項

- ・医師・義肢装具士の指示に従って下さい。
- ・必ず肌着又はTシャツ1枚着た上に装着して下さい。
- ・コルセットが壊れていないか確認して下さい。
- ・修理や改造をしないで下さい。常に清潔にして下さい。
- ・肌のトラブルや痛みを生じた場合、直ちに医師の指導を受けて下さい。
- ・洗う事は出来ますが、手洗いで陰干しをして下さい。

※その他、ご不明な点は下記までご連絡下さい

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-30-13

有限会社 内藤義肢製作所

TEL03-3981-3288 担当