

◎ P T B 装具の装着方法 ◎

① パーツが揃っているか確認

左から

- ① アンダースリーブ
- ② 前あて (白色)
- ③ ソケット (黒色 or ベージュ色)
- ④ 靴

計 4 つ



② アンダースリーブと靴の装着

- ・ アンダースリーブは膝上まで上げます。
- ・ 逆の足には加工済みの靴を履きます。

※靴はお渡しした靴を必ず履いて下さい。



③ ソケットの装着

- ・ ソケットを広げ、前から足を押し込む様にします。

※上から足を入れようとする、くるぶしがソケットにぶつかり、うまく装着出来ません。

◎ 良い例



✕ 悪い例



④ 足先のマジックをとめる


- ・ マジックは金属の輪 (カン) に通して折り返して下さい。
- ・ 2~3本のマジックがついています。

※締め加減には十分注意して下さい。
しびれやむくみ血行不良にも注意して下さい。



⑤ 前あての装着

- ・ 前あては膝の形状に合わせる様に上から押し込みます。
- ・ 膝の下に窪みを合わせると、膝が半分ぐらい隠れるようになります。

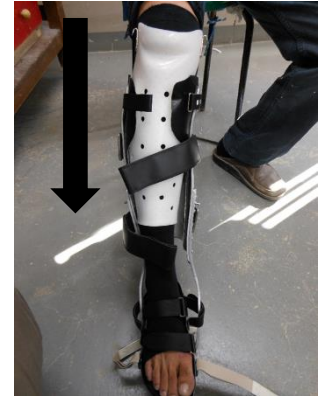

- ・ 上から押し込み前あての窪みとソケットの窪みを合わせます。

ソケットの窪み (黒 or ベージュ)



前あての窪み (白色)

※窪みを合わせる時は膝が半分ぐらい隠れているか確認して下さい。
必ず窪みが膝の下にきます。膝の位置を必ず確認して下さい。

- ・合わせると前あてについている2箇所のフックがソケットの縁に引っかかります。




※位置が違くと

フックが縁にうまく引っかかりません。

⑥ ソケットのマジックをとめます

- ・前あてのフックが縁にきたらソケットのマジックを順番にとめます。

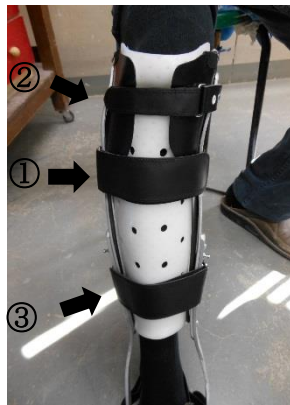

※マジックの締め加減には注意して下さい。

一度で締めるのは難しいため何度かに分けて締めて下さい。

⑦ フットアップバンドの装着

- ・親指側と小指側に2本のバンドがついています。
- ・クロスをさせて引っ掛けます。



※つま先をつきにくくしてあるが、自分でつま先を上げる様に心掛けて下さい。

※フットアップバンドは骨折部位や医師の診断により、ついていない場合もあります。



⑧ チェック項目確認

- ・装着位置はあっているか。
- ・プラスチックや金属が当たって痛くないか。
- ・足が下についてないか。
(お皿の下で体重を支えるため膝の曲げ過ぎにより足が下に落ちる事があります。)
- ・マジックの締め具合は適切か。
(しびれ・むくみ・血行など)
- ・装具とは逆の足に靴を履いているか。
- ・膝を曲げ過ぎると膝裏がぶつかる様になっているか。
(それ以上曲げると足が下に落ちてしまう事があります。)

※膝を曲げ過ぎるとぶつかる所です。



⑨ 注意事項

- ・仕様は医師の指示に従って下さい。
- ・装着前・装着後に破損がないか確認して下さい。
- ・修理や加工をしないで下さい。
- ・痛みや傷などの症状が現れた場合には直ちに医師に相談して下さい。
- ・マジックの締め加減には注意して下さい。
- ・歩く時に使用するものなので、寝る時やゆっくりする時ははずしても大丈夫です。
- ・大変申し訳ありませんが室内では底を拭いて使用して下さい。(またはご相談下さい。)

その他、ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

有限会社 内藤義肢製作所
〒170-0005 東京都豊島区南大塚 3-30-13
TEL 03-3981-3288 FAX 03-3987-1084
担当