

◎ P T B 装具の装着方法◎

① パーツが揃っているか確認

左から

- ① アンダースリーブ
 - ② 前あて (白色)
 - ③ ソケット
 - ④ 靴
- 計 4 つ



④ ソケットの装着

- ・前あてを装着した状態でソケットを広げて足の中に入れます。
- ・ふくらはぎをソケットで覆う様にします。

※この時、足を上から押しこむのではなく、前から足を押し込んで覆う様にして下さい。



② アンダースリーブと靴の装着

- ・アンダースリーブは膝上まで上げます。
- ・逆の足には加工済みの靴を履きます。

※靴はお渡しした靴を必ず履いて下さい。



○ 良い例




✕ 悪い例



③ 前あての装着

- ・前あては膝の形状に合わせます。
- ・膝の下に窪みを合わせ足首のバンドを止めます。

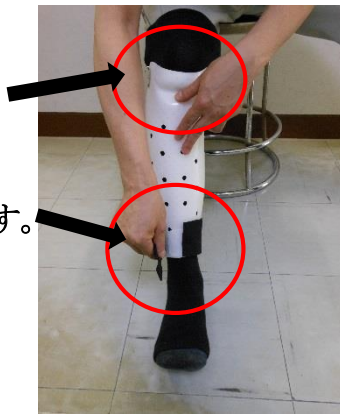


- ・前あて装着完了

※膝の位置を必ず確認して下さい。
膝は半分ぐらい前あてで隠れるようになります。



- ・ソケットと前あての窪みを合わせます。

※窪みを合わせる時は膝が半分ぐらい隠れているか確認して下さい。
必ず窪みが膝の下にきます。

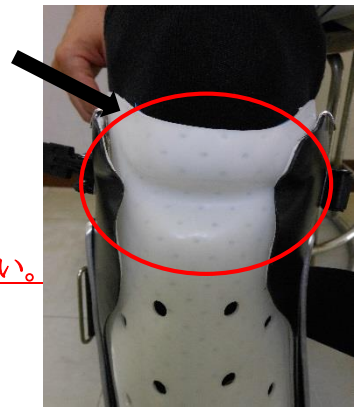


- ・合わせると前あてについている2箇所のフックがソケットの縁に引っかかります。

※位置が違うとフックが縁に引っかかりません。



⑤ ソケットと足先のマジックをとめる

- 順番にマジックを止めていきます。
- 金属の輪（カン）に通して折り返して下さい。
- 足先は2本～3本のマジックがついています。

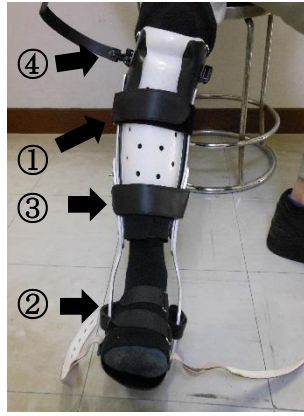

※一度で締めるのは難しいため何度かに分けて締めて下さい。締め過ぎや緩め過ぎにも注意して下さい。

- ④マジックはバックル式になっています。
- 内側の受けに差し込む様になっています。



※しびれやむくみ血行不良に注意して下さい。



- 受けに差し込んだら強さを確認し外側のバックル本体を後方にとめます。



• 装着完了

- バックルは Push ボタンを押す事ではずせません。



⑥ フットアップバンドの装着

- 親指側と小指側に2本のバンドがついています。
- クロスをさせて引っ掛けます。



• 装着完了

※つま先をつきにくくしてあるが、自分でつま先を上げる様に心掛けて下さい。

⑦ 装着完了

- すべての装着が完了したら、足が浮いている事と、チェック項目の確認をする。



※体重をかけて足が浮いているのを確認。



- 浮いている

⑧ チェック項目確認

- 装着位置はあっているか。
- プラスチックや金属が当たって痛くないか。
- 足が下についてないか。
(お皿の下で体重を支えるため膝の曲げ過ぎにより足が下に落ちる事があります。)
- マジックの締め具合は適切か。
(しびれ・むくみ・血行など)
- 装具とは逆の足に靴を履いているか。
- 膝を曲げ過ぎると膝裏がぶつかる様になっているか。
(それ以上曲げると足が下に落ちてしまう事があります。)

※膝を曲げ過ぎるとぶつかる所



⑨ 注意事項

- 仕様は医師の指示に従って下さい。
- 装着前・装着後に破損がないか
確認して下さい。
- 修理や加工をしないで下さい。
- 痛みや傷などの症状が現れた場合には
直ちに医師に相談して下さい。
- マジックの締め加減には注意して下さい。
- 歩く時に使用するものなので、寝る時やゆっくりする時ははずしても大丈夫です。
- 大変申し訳ありませんが室内では底を拭いて
使用して下さい。(またはご相談下さい。)

その他、ご不明な点がありましたら下記まで
ご連絡下さい。

有限会社 内藤義肢製作所
〒170-0005 東京都豊島区南大塚 3-30-13
TEL 03-3981-3288 FAX 03-3987-1084
担当