

◎グラフアン装具の装着方法◎

① パーツが揃っているか確認

・左から

①ソケット（装具）（黒色 or ベージュ色）

②加工した靴 計2つ



①



②

※仕様によりオーバーシューズが付きます

② 加工してある靴を履きます

・ケガをしていない方の足に加工済みの靴を履きます。

※靴はお渡しした靴を必ず履いて下さい。



③ ソケット（装具）の装着

・足を上から下ろすように装具の中に足を入れます。

・土踏まずを装具と合わせる様にします。



※装具の踵に大きく穴があいているので踵をその穴に合わせる様にします。

④ 足の甲のマジックの装着

- ・マジックは金属の輪（カン）に通して折り返して下さい。
- ・2～3本のマジックがついています。



※締め加減には

十分注意して下さい。

しびれやむくみ血行不良

にも注意して下さい。

前面

- ・装着後、後方から見て踵が浮いている事を確認して下さい。



後面

⑤ オーバーシューズを履きます

- ・オーバーシューズは仕様により異なります。

※担当者にご相談ください。

⑧ チェック項目確認

- ・装着位置はあっているか。
- ・プラスチックや金属が当たって痛くないか。
- ・踵が下についてないか。（土踏まずが押される感覚がします。）
- ・マジックの締め具合は適切か。（しびれ・むくみ・血行など）
- ・装具とは逆の足に靴を履いているか。

⑨ 装着完了

- ・チェック項目を確認できたら装着完了です。

※最初は、松葉杖などを使用し歩いて下さい。



⑩ 注意事項

- ・仕様は医師の指示に従って下さい。
- ・装着前・装着後に破損がないか
確認して下さい。
- ・修理や加工をしないで下さい。
- ・痛みや傷などの症状が現れた場合には
直ちに医師に相談して下さい。
- ・マジックの締め加減には注意して下さい。
- ・歩く時に使用するものなので、寝る時や
ゆっくりする時ははずしても大丈夫です。
- ・大変申し訳ありませんが室内では底を拭いて
使用して下さい。(またはご相談下さい。)

その他、ご不明な点がございましたら下記まで
ご連絡下さい。

有限会社 内藤義肢製作所
〒170-0005 東京都豊島区南大塚 3-30-13
TEL 03-3981-3288 FAX 03-3987-1084
担当