

◎大腿 FB 装具の装着方法◎

(ファンクショナルブレース)

① パーツが揃っているか確認

- ・左から
 - ①ソケット (装具)
 - ②前あて
 - ③シレジアバンド (腰ベルト)
- 計3つ



①

②




③

※医師の診断や骨折部位により腰ベルトは異なることがあります。

② ソケットの装着

- ・足を持ち上げ太ももを上からソケットの中に押し込むようにします。内側からソケットまでを1横指ぐらい下げた位置まで装具を上にあげます。

1横指ぐらいあける

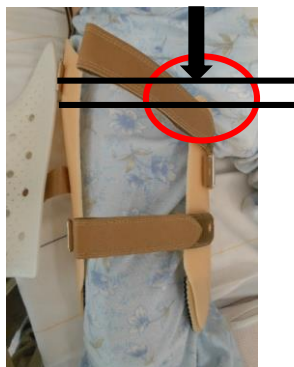

※足を持ち上げる時は

十分注意して下さい。

装具を上げ過ぎて内側に

当たらない様にして下さい。

③ 前あての装着

- ・前あては、ソケットの内側に入るようになっていいます。真ん中のバンドで外れないようになっていいます。



※真ん中のバンドをとって
使用します。前あては
ソケットの内側に入れて
下さい。



④ マジックの装着

- ・マジックは金属の輪(カン)に通して折り返して下さい。
- ・3～4本のマジックがついています。順番に締めていきます。

※締め加減には

十分注意して下さい。


しびれやむくみ血行不良

にも注意して下さい。

締めたときにお肉を

挟まない様に注意して

下さい。

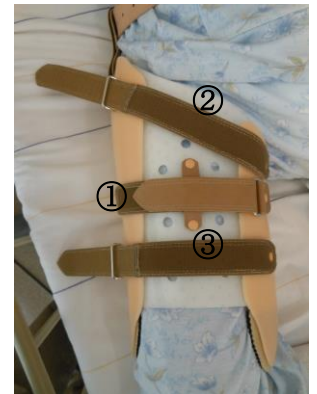

⑤ シレジアバンド（腰ベルト）の装着

- ・装具のみでは下にずり落ちやすいため、腰にベルトを巻いて落ちないようにします。

※締め加減には
十分注意して下さい。



- ・シレジアバンドの位置は外側にあるマジックで調整して下さい。ウエストの辺りでつけると丁度良い位置になります。



外側

⑥ 装着完了

- ・マジック・シレジアバンドを締めたら装着完了です。
チェック項目を確認して下さい。



⑦ チェック項目確認

- ・装着位置はあっているか。
- ・プラスチックや金属が当たって痛くないか。
- ・マジックの締め具合は適切か。
(しびれ・むくみ・血行など)
- ・破損はしていないか。
- ・内側に装具が当たっていないか。



⑧ 注意事項

- ・仕様は医師の指示に従って下さい。
- ・装着前・装着後に破損がないか
確認して下さい。
- ・修理や加工をしないで下さい。
- ・痛みや傷などの症状が現れた場合には
直ちに医師に相談して下さい。
- ・マジックの締め加減には注意して下さい。
- ・歩く時・安静時・移動の際に使用して下さい。
- ・基本的には常時装着となりますが、詳しくは
医師の指示に従って下さい。

その他、ご不明な点がございましたら下記まで
ご連絡下さい。

有限会社 内藤義肢製作所
〒170-0005 東京都豊島区南大塚 3-30-13
TEL 03-3981-3288 FAX 03-3987-1084
担当