

## ◎硬性コルセット装着方法◎

※コルセットはオーダーメイドで制作するため、  
骨折部位や医師の診断により、長さ・大きさは  
それぞれ異なります。

### ① 装着位置



- ・コルセットの窪みをウエスト周りに合わせます。骨盤の骨（上前腸骨棘 **X** 印）を覆うようにします。

### ② マジックベルトの付け方

マジックベルト

カン



- ・位置が決まったら、マジックベルトをカンに通して折り返し、仮止めします。
- ・仮止め後、数回に分けてマジックベルトを締め直し、患部がしっかりと固定されていることを確かめます。

※締め加減には注意して下さい。

マジックベルトの本数はコルセットに応じて異なる場合があります。

### ③ 装着位置の確認

- ・装着をしたらイスやベッドに座り足の付け根（鼠径部）にコルセット下縁が当たらないか確認して下さい。当たる場合は少しコルセットを上にはずらして下さい。

※低いイスや足を上げようとするとぶつかってきます。

### ④ 注意事項

- ・医師・義肢装具士の指示に従って下さい。
- ・必ず肌着や病院着又はTシャツなど1枚着た上に装着して下さい。
- ・コルセットが壊れていないか確認して下さい。
- ・修理や改造をしないで下さい。常に清潔にして下さい。
- ・肌のトラブルや痛みを生じた場合、直ちに医師の指導を受けて下さい。

※その他、ご不明な点は下記までご連絡下さい。

〒170-0005

東京都豊島区南大塚 3-30-13

TEL 03-3981-3288

有限会社 内藤義肢製作所