

## ◎プラスチックジュエツト装着方法◎

※コルセットはオーダーメイドで制作するため、骨折部位や医師の診断により、長さ・大きさはそれぞれ異なります。

### ① 装着位置


- 骨盤の骨（上前腸骨棘 **✕** 印）の上にコルセットの下縁がくるように装着します。



- 背面は背骨がパッドの中心に来るように設定します。



### ② マジックベルトの付け方

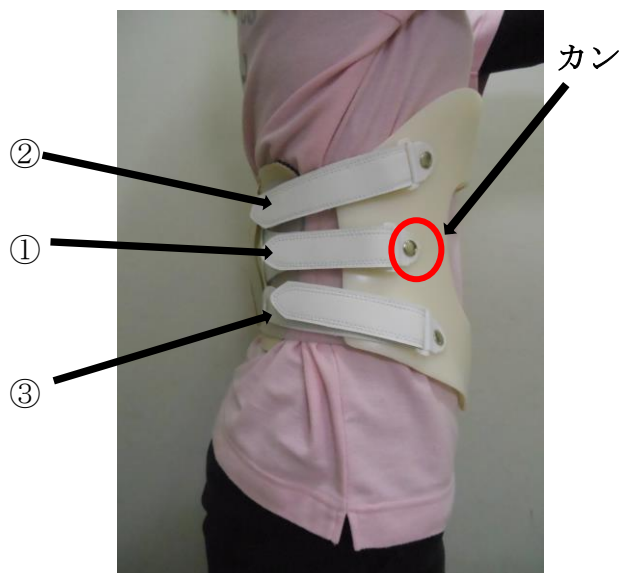

- 位置が決まったら、1から順番にマジックベルトをカンに通して折り返します。骨盤の骨（上前腸骨棘 **✕** 印）が設定位置にあるか確認して下さい。

※締め加減に注意して下さい。

マジックベルトの本数はコルセットに応じて異なる場合があります。



- 3本のベルトの長さが、長すぎたり短すぎたりする場合は反対側のベルトで締め具合を調節することで長さの変更ができます。

### ③ 装着位置の確認

- ・装着をしたらイスやベッドに座り、足の付け根（鼠径部）にコルセット下縁が当たらないか確認して下さい。当たる場合は少しコルセットを上にならして下さい。

※低いイスや足を上げようとするとぶつかってきます。



### ④ 注意事項

- ・医師・義肢装具士の指示に従って下さい。
  - ・必ず肌着や病院着又はTシャツなど1枚着た上に装着して下さい。
  - ・コルセットが壊れていないか確認して下さい。
  - ・修理や改造をしないで下さい。常に清潔にしてください。
  - ・肌のトラブルや痛みを生じた場合、直ちに医師の指導を受けて下さい。
- ※その他、ご不明な点は下記までご連絡下さい。

〒170-0005 東京都豊島区南大塚 3-30-13  
TEL 03-3981-3288  
有限会社 内藤義肢製作所